

Hvad er restifem?

restifem® er et vaginalt støttepessar af silikone.

Anvendelsesområde


Til unge mødre og modne kvinder: Pessaret kan lindre symptomerne ved stressinkontinens eller nedsynkning og har præventive og terapeutiske egenskaber. Efter en fødsel aflaster restifem® bækkenbundsbindevævet (især livmoderens holdemuskulatur og urininkontinensens kontrolsystem) og fremmer derved genoprettelsen heraf.

Oplysninger om brug

Anvendes efter en fødsel og endt barselflåd i mindst 3-6 måneder, eller så længe der ammes, eller der mærkes bækkenbundsgener.

Sættes op om morgenen, og tages ud og rengøres lige før sengetid.

- 1 Skamben
- 2 Urinrør
- 3 Urinblære
- 4 Livmoder
- 5 Endetarm
- 6 Bækkenbund
- 7 restifem®

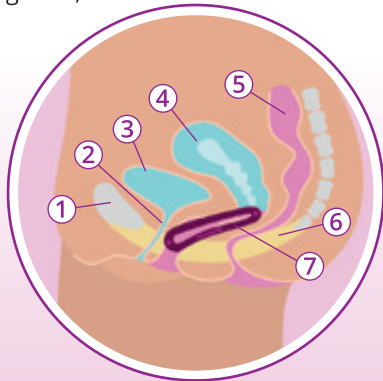

Medicinprodukt fra Tyskland

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Str. 90
14797 Kloster Lehnin
TYSKLAND
E-Mail: info@restifem.com

CE2274

Flere informationer om:

www.restifem.com

small



Mål

Længde: 7,0 cm
Bredde fortil: 3,0 cm
Bredde bagtil: 4,0 cm
Artikel-nr.: R011S

medium



Mål

Længde: 8,0 cm
Bredde fortil: 3,5 cm
Bredde bagtil: 4,5 cm
Artikel-nr.: R011M

set

(1 small, 1 medium)

Artikel-nr.: R011Set

Rådgivning og salg

Props & Pearls,
Nikolaj Plads 23,
1067 København K

restifem® kan købes her:
shop.propsandpearls.com

Læs mere på
propsandpearls.com
eller skriv til os på
info@propsandpearls.com

restifem[®]
back to balance



**Innovation inden
for pessarterapien**

VIOMED

VIOMED

Bækkenbundsinnovationen

Præventiv effekt

Efter en graviditet og fødsel er bækkenbundsbindevævet udvidet og nogle gange også beskadiget, og bækkenbundsmuskulaturen er overbelastet. Terapien med støttepessaret aflaster både vævet og muskulaturen og fremmer genoprettelsesprocessen. En optimal genoprettelse kan reducere risikoen for en senere nedsat funktion af bækkenbunden. Kvinder, der har født vaginalt og ved kejsersnit, kan bære pessaret.


Fremme af genoprettelsesprocessen efter en fødsel

Aflastning/stabilisering af bækkenbundsbindevævet

Aflastning af bækkenbundsmuskulaturen

restifem[®]
back to balance

Prævention og terapi

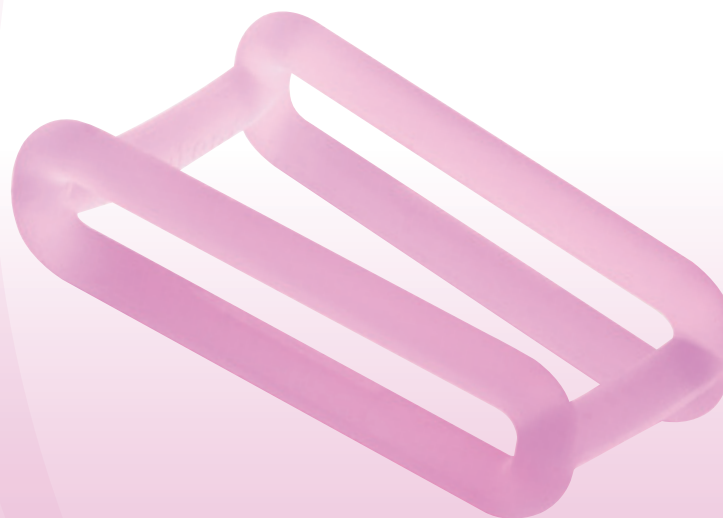

Nem at håndtere for brugeren

Terapeutisk effekt

Hos kvinder, der lider af stressinkontinens (ufrivillig vandladning) og/eller descensus (især nedsynkning af livmoder, nedsynkning af skede), kan disse gener lindres eller stoppes ved at bære pessaret. Pessaret løfter livmoderen op og støtter blæren og urinrøret.

Terapi mod descensus og stressinkontinens

Holdemekanisme bag symfyen

Pessarform tilpasset til vaginaens anatomi og funktion