

Što je restifem

restifem® je silikonski vaginalni potporni pesar.

Područje primjene


Bilo za mlade majke ili zrele žene: pesar može ublažiti simptome stresne urinarne inkontinencije ili spuštene maternice, a ima preventivna i terapijska svojstva. Nakon porođaja restifem® rasterećuje vezivno tkivo zdjeličnog dna (u prvom redu potporni aparat maternice i sustav za kontrolu urinarne kontinencije), potičući time njegov oporavak.

Upute za uporabu

Upotreba nakon porođaja, nakon završetka babinja, tijekom najmanje 3 do 6 mjeseci, odnosno sve dok traje dojenje ili su prisutne tegobe zdjeličnog dna.

Umetnite pesar ujutro, izvadite ga i navečer očistite.

- 1 pubična kost
- 2 uretra
- 3 mokraćni mjehur
- 4 maternica
- 5 završni dio debelog crijeva
- 6 zdjelično dno
- 7 restifem®

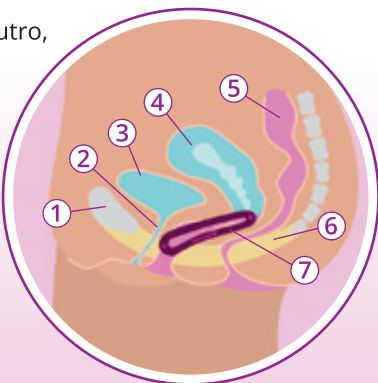

Medicinski proizvodi iz Njemačke

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Str. 90
14797 Kloster Lehnin
Njemačka
E-pošta: info@restifem.com

Dodatne informacije na:

www.restifem.com

small



Dimenzije

Duljina: 7,0 cm
Širina sprijeda: 3,0 cm
Širina straga: 4,0 cm
Kataloški broj: R011S
Centralni
farmaceutski broj: 7820028

medium



Dimenzije

Duljina: 8,0 cm
Širina sprijeda: 3,5 cm
Širina straga: 4,5 cm
Kataloški broj: R011M
Centralni
farmaceutski broj: 7820029

set

(1 small, 1 medium)

Kataloški broj: R011Set
Centralni
farmaceutski broj: 7820030

Savjetovanje i prodaja:

EURO TRENK d.o.o.
Maja Matanić
0977682-0230
eurotrenk@eurotrenk.hr
www.eurotrenk.hr

restifem®
back to balance

Inovacija
u terapiji pesarima

VIOMED

VIOMED

Inovacija za zdjelično dno

Preventivni učinak

Tijekom trudnoće i porođaja dolazi do prekomjernog istezanja, a ponekad i do ozljeda vezivnog tkiva zdjeličnog dna, kao i do preopterećenja mišića zdjeličnog dna. Oboje se ublažava terapijom potpornim pesarom, čime se potiče proces oporavka. Optimalan oporavak može smanjiti rizik za kasnija funkcionalna ograničenja zdjeličnog dna. Pesar mogu nositi žene nakon vaginalnog porođaja i carskog reza.


Potiče procese oporavka
nakon porođaja

Rasterećenje / stabilizacija
vezivnog tkiva zdjeličnog dna

Rasterećenje mišića
zdjeličnog dna



Prevenција i terapija

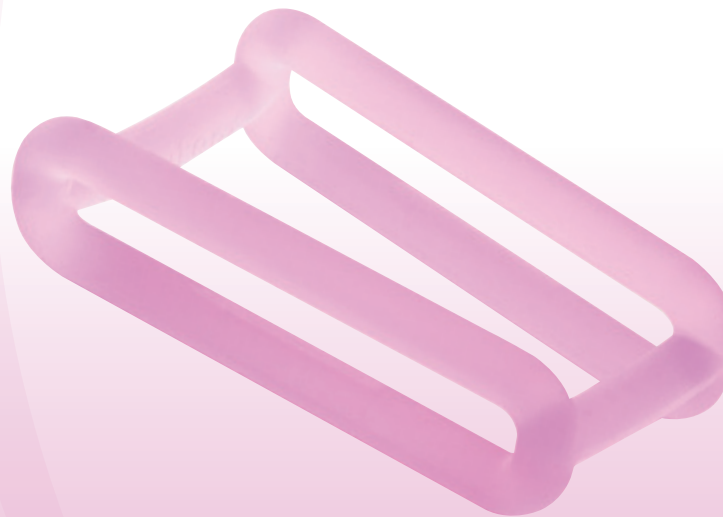

Jednostavno rukovanje
za korisnice

Terapijski učinak

U žena koje boluju od stresne urinarne inkontinencije (nekontrolirano ispuštanje mokraće) i/ili descensusa (u prvom redu spuštene maternice, spuštene vagine), nošenje može ublažiti, odnosno otkloniti tegobe. Pesar podiže maternicu u pravilan položaj te pruža potporu mokraćnom mjehuru i mokraćovodu.

Terapija za descensus i stresnu
urinaru inkontinenciju

Potporni mehanizam
iza simfize

Pesar oblikom
prilagođen anatomiji
i konfiguraciji vagine