

Qué es restifem

restifem® es un pesario vaginal fabricado en silicona.

Aplicación


Para madres jóvenes y mujeres mayores. El pesario alivia los síntomas de la incontinencia urinaria de esfuerzo y del prolapso genital, por lo que cuenta con efectos preventivos y terapéuticos. restifem® brinda soporte al tejido conectivo del suelo pélvico (en especial, a los ligamentos de soporte del útero y al sistema de control de la continencia urinaria) después del parto y favorece de este modo su recuperación.

Modo de empleo

Utilizar después del parto, una vez finalizadas las secreciones vaginales, durante al menos 3 a 6 semanas, o durante el tiempo que dure la lactancia o persistan los trastornos del suelo pélvico.

Insertar por la mañana y retirar y limpiar por la noche.

- 1 Hueso púbico
- 2 Uretra
- 3 Vejiga
- 4 Útero
- 5 Recto
- 6 Suelo pélvico
- 7 restifem®

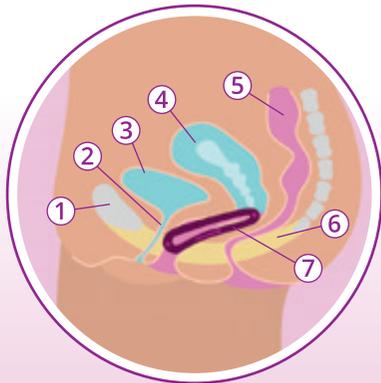

Cómo puedo conseguir restifem

Podrá adquirir restifem® en nuestra tienda en línea:

www.restifem-shop.com

Si lo desea, también puede hacer el pedido por correo electrónico:
info@restifem.com

Para más información, visite:

www.restifem.com

small



Medidas

Longitud: 7,0 cm
Ancho (parte anterior): 3,0 cm
Ancho (parte posterior): 4,0 cm

Ref.: R011S

medium



Medidas

Longitud: 8,0 cm
Ancho (parte anterior): 3,5 cm
Ancho (parte posterior): 4,5 cm

Ref.: R011M

set

(1 small, 1 medium)

Ref.: R011Set

Contacto y asesoramiento:

VIOMED Vertriebs GmbH
Berliner Straße 90
14797 KLOSTER LEHNIN
ALEMANIA
Fax: +49 (0) 3382 7042 81
E-Mail: info@restifem.com
Web: www.restifem.com
Shop: www.restifem-shop.com

restifem[®]
back to balance

**Innovación en el
tratamiento con pesario**

VIOMED

VIOMED

Innovación para el suelo pélvico

Efecto preventivo

El embarazo y el parto producen un sobreestiramiento del tejido conectivo del suelo pélvico -en ocasiones, incluso dañándolo-, así como una sobrecarga de su musculatura. El tratamiento terapéutico con pesario de refuerzo descarga la musculatura y el tejido conjuntivo y favorece el proceso de recuperación. Una recuperación óptima puede reducir el riesgo de sufrir limitaciones funcionales en el futuro. El pesario está indicado después del parto vaginal o el parto por cesárea.



Efecto terapéutico

El uso de pesarios puede aliviar y eliminar la incontinencia urinaria de esfuerzo (pérdida involuntaria de orina) y el prolapso genital; especialmente, el prolapso del útero o de la vagina. El pesario modifica la inclinación del útero y sirve de soporte a la vejiga y la uretra.

Tratamiento terapéutico y preventivo



Tratamiento terapéutico para el prolapso y la incontinencia urinaria de esfuerzo

Mecanismo de sujeción retrosinfisiario

Forma ergonómica adaptada a la anatomía vaginal

Fácil de usar

Favorece el proceso de recuperación tras el parto

Descarga y estabiliza el tejido conectivo del suelo pélvico

Descarga la musculatura del suelo pélvico