

ما هو منتج restifem®


منتج restifem® عبارة عن فرزجة داعمة مهبلية مصنوعة من السيليكون.

نطاق الاستخدام

سواء كنت أم شابة أو امرأة ناضجة، يمكن للفرزجة أن تخفف من أعراض سلس البول الإجهادي أو التدلي ولها خصائص وقائية وعلاجية. يعمل منتج restifem® بعد الولادة على تخفيف الإجهاد عن النسيج الضام لقاع الحوض (سيما الهيكل الداعم للرحم ونظام التحكم في سلس البول) ما يعزز من التعافي.

تعليمات الاستخدام

يستخدم بعد الولادة عقب انتهاء إفرازات النفاس ولمدة 6-3 أشهر على الأقل أو طوال مدة الرضاعة الطبيعية أو طالما كانت لديك مشكلات في قاع الحوض.
ضعها صباحاً وأزيليها ونظفيها ليلاً.

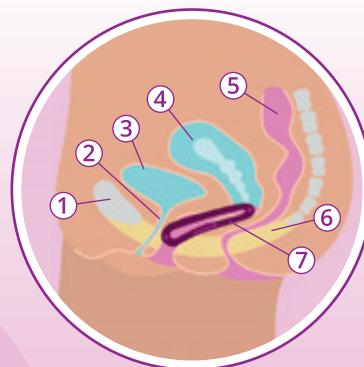

أين يمكنني الحصول على منتج restifem®

يمكن الحصول على منتج restifem® في متجرنا عبر الإنترنت، أو طلبه عبر البريد الإلكتروني.

www.restifem-shop.com • info@restifem.com

المزيد من المعلومات على

www.restifem.com

صغر



الأبعاد

الطول: 7,0 سم
العرض أماماً: 3,0 سم
العرض خلفاً: 4,0 سم

رقم الجزء: R011S

وسط



الأبعاد

الطول: 8,0 سم
العرض أماماً: 3,5 سم
العرض خلفاً: 4,5 سم

رقم الجزء: R011M

مجموعة

(1) وسط, 1 صغير)

رقم الجزء: R011Set

الشراء المباشر والمشورة:

فيوميد فرتربيس ش.ذ.م.م

برلينز شتراسه 90

كلوستر لينين 14797

ألمانيا

فاكس 81 3382 7042

info@restifem.com البريد الإلكتروني

www.restifem.com الموقع الإلكتروني

www.restifem-shop.com المتجر

restifem®
back to balance



الابتكار في العلاج بالفرزجة

VIOMED

VIOMED

ابتكار لقاع الحوض

تأثير وقائي

يؤدي الحمل والولادة إلى تعدد مفرط في النسيج الضام لقاع الحوض، وإلى بعض الإصابات أحياناً، إضافة إلى زيادة التحميل على عضلات قاع الحوض. ويمكن التخفيف من كلا الأمرين بالعلاج باستخدام الفرزجة الداعمة لدعم عملية التعافي وتعزيزها. ويمكن أن يؤدي التعافي المثالي إلى الحد من مخاطر حدوث تقييدات وظيفية لاحقة لقاع الحوض. يمكن للسيدات بعد الولادة الطبيعية وكذلك بعد الولادة القيصرية استخدام الفرزجة.

دعم عمليات التعافي بعد الولادة

تحفيض الإجهاد عن النسيج الضام
لقاع الحوض وتشييته

تحفيض الإجهاد عن عضلات
قاع الحوض



تأثير علاجي

بالنسبة للسيدات اللاتي يعانين من سلس البول الإجهادي (تسرب البول اللإرادي) و/أو التدلي (سيما هبوط الرحم، هبوط المهبل)، يمكن تخفيف هذه الأعراض أو معالجتها عن طريق الفرزجة؛ حيث تعمل الفرزجة على تقويم الرحم وتدعيم المثانة ومجرى البول.

الوقاية والعلاج



علاج التدلي وسلسل البول الإجهادي

آلية تثبيت بالارتفاع
العاني الخلفي

يتنااسب شكل الفرزجة مع تشريح
المهبل وتكوينه

سهولة الاستخدام